

Bedienungsanleitung

USB Heating Eye Mask

Modell : VEM-200



⚠ Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden

INHALT

Vorsicht	1
1. Verwendungszweck	1
2. Produktstruktur	1
3. Bedienungsschritt	2
4. Augenmaske S Blatt	2
5. Wartung	3
6. Reinigung	3
7. Spezifikation	3
8. Packliste	3
9. Fehlerbehebung	4

⚠ Vorsicht

- 1) Bitte verwenden Sie das vom Hersteller mitgelieferte Original - Temperaturregelkabel.
- 2) Bitte verwenden Sie ein CE- oder FCC- und UL-zertifiziertes Netzteil oder eine Powerbank mit einer Ausgangsspannung von 5 V/1 A.
- 3) Bitte verwenden Sie die Augenmaske mit Vorsicht und prüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Temperatur.
- 4) Wenn der Benutzer an einer Augenerkrankung oder -verletzung oder einem hohen Augeninnendruck leidet, konsultieren Sie vor der Verwendung bitte zunächst einen Arzt.
- 5) Wenn sich der Benutzer nach der Anwendung unwohl fühlt, beenden Sie die Anwendung bitte und konsultieren Sie einen Arzt.
- 6) Aufgrund der individuellen Hautempfindlichkeit verkürzen Sie bitte die Anwendungszeit oder unterbrechen Sie die Anwendung, wenn Sie eine hohe Temperatur spüren, um Verbrennungen durch niedrige Temperaturen zu vermeiden.
- 7) Bitte verwenden Sie die Augenmaske nicht öfter als zweimal täglich.
- 8) In der Augenmaske befindet sich ein Schaltkreis. Bitte zerlegen Sie ihn nicht.
- 9) Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn die Augenmaske längere Zeit nicht verwendet wird.
- 10) Bitte trocken und kühl lagern, um Schäden durch Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse zu vermeiden.
- 11) Die Verwendung einer Augenmaske wird für Personen ab 18 Jahren empfohlen.
- 12) Die Augenmaske ist kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Augenmaske von Babys und Kindern fern.

1. Verwendungszweck

Die Augenmaske lindert Augenermüdung durch warme Kompressen. Die Lebensdauer der Augenmaske beträgt das 750-fache der Erwärmung.

2. Produktstruktur



Abb. 1 Augenmaske

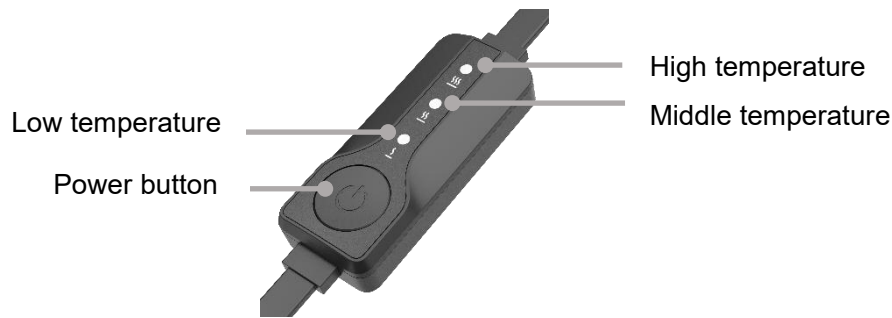


Abb. 2 Temperatur -Steuerkabel

3. Bedienungsschritt

- 1) mitgelieferten Temperaturkontrollkabel an das Netzteil/die Powerbank mit der Ausgangsspannung DC 5 V/1 A an .
- 2) Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Wenn die Augenmaske eingeschaltet ist, ist die ursprüngliche Temperatur auf dem höchsten Niveau (44 °C /111 °F).
- 3) Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um zwischen den Temperaturoptionen 44 °C (111 °F) , 41 °C (106 °F) und 39 °C (102 °F) zu wechseln . Die Temperaturanzeige lautet wie folgt:

● (44°C/111°F) ● (41°C/106°F) ● (39°C/102°F)

Beim Umschalten auf eine andere Temperatur gibt die Augenmaske einen kurzen Piepton aus.

Nach 12 Minuten Heizzeit schaltet sich die Augenmaske automatisch mit drei kurzen Pieptönen aus . Alternativ kann der Benutzer die Heizung jederzeit durch Drücken der Einschalttaste ausschalten.

- 4) Setzen Sie die Augenmaske auf und stellen Sie das elastische Band auf eine angenehme Höhe ein.
- 5) Drücken Sie den flexiblen FlexStrip richtig an, damit er besser zum Gesicht passt.



- 6) Während des Heizvorgangs hören Sie zwei lange Pieptöne. Es wird empfohlen, nach jedem langen Piepton dreimal kräftig zu blinzeln.
- 7) Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Signaltöne ein- bzw. auszuschalten.

⚠ Wenn die Augenmaske eingeschaltet ist, ist die ursprüngliche Temperatur auf dem höchsten Niveau (44 °C /111 °F).

⚠ Bitte kein Wasser auf die Augenmaske sprühen

4. Augenmaske S Blatt

Die Augenmaske ist austauschbar. Sie ist maschinenwaschbar und trocknergeeignet. Die Lebensdauer der Augenmaske beträgt 60-maliges Erhitzen. Danach empfiehlt es sich, eine neue Maske zu verwenden.

5. Wartung

- Bitte bewahren Sie die Augenmaske auf, um Feuchtigkeit und Verschmutzung zu vermeiden
- Bei Fehlfunktionen der Augenmaske wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Zerlegen Sie die Augenmaske bitte nicht selbst.
- Bitte bewahren Sie die Augenmaske an einem gut belüfteten Ort auf und vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung sowie ätzende Gase oder Flüssigkeiten.
- Die Augenmaske ist für den Transport per Flugzeug, Bahn, Straße und Schiff geeignet. Bitte vermeiden Sie, dass die Maske durch Regen oder Schnee nass wird, auf den Kopf gestellt wird oder zerdrückt wird.
- Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vorsicht: Bitte setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit aus. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie es bitte und bewahren Sie es im Reißverschlussbeutel auf.

6. Reinigung

- 1) Bitte reinigen Sie den Schmutz auf der Oberfläche mit einem sauberen Tuch.
- 2) Bei starker Verschmutzung wischen Sie bitte vorsichtig mit einem feuchten, in neutrales Reinigungsmittel getauchten Tuch ab.
- 3) Bitte lassen Sie kein Wasser in die Augenmaske eindringen.
- 4) Halten Sie das Produkt trocken.

7. Spezifikation

Modell	VEM-200
Heizmethode	Stromversorgung über USB-Anschluss
Heiztemperatur	44 °C /111 °F , 41 °C / 106 °F , 39 °C /102 °F *
Heizdauer	12 Minuten *
Eingangsspannung	Gleichstrom 5 V/1 A
Stromverbrauch	4 W $\pm$ 5 %
Produktgröße	22 x 7 cm
Gewicht	25 g

* Die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Temperaturabweichung beträgt ± 3 °C /37,4 °F .

* Sofern nicht anders angegeben, stammen die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Daten aus dem VisuScience -Labor. Aufgrund spezifischer Änderungen objektiver Faktoren können die Daten abweichen.

8. Packliste

Name	Menge
Augenmaske mit Tuch	1 Stück
Temperaturkontrollkabel	1 Stück
Reißverschlusstasche	1 Stück
Benutzerhandbuch	1 Stück

9. Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Möglicher Grund	Lösung
Die Augenmaske kann keine Wärme erzeugen	1).Das Produkt ist ausgeschaltet 2). Das Produkt wurde 12 Minuten lang erhitzt und schaltet sich automatisch ab	1).Kurze Taste drücken zum Einschalten 2).Drücken Sie kurz die Taste zum Einschaltenwieder
Die Leuchtanzeige an der Temperaturregelung kann nicht leuchten	1). Das Temperaturkontrollkabel oder das Netzteil ist defekt 2).Temperaturregelkabel schlecht angeschlossen	1). Temperaturregelkabel oder Netzteil austauschen 2). Stecken Sie das Temperaturregelkabel wieder fest
Die rote Kontrollleuchte blinkt ständig	Das Temperaturregelkabel oder der Schaltkreis in der Augenmaske ist kurzgeschlossen	Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und beenden Sie die Verwendung der Augenmaske

 Wenn die Augenmaske nach dem Ausprobieren der oben genannten Lösung immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller. Bitte zerlegen Sie die Augenmaske nicht selbst.



VisuScience Meditech Co., Ltd.

Address: Room 501,503 Ruiyun 5 No. 99 Furongzhongsan Rd., Wuxi, China

Tel: +86 510 85757880 Email: info@visuscience.com

Website: www.visuscience.com



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA

Capelle aan den IJssel, The Netherlands

